

Instrukcja dla użytkownika
platformy DOM w ramach
programu pilotażowego
SmartDoctor



Domowa
Opieka
Medyczna



Moduł pacjenta



Domowa
Opieka
Medyczna




Ministerstwo Zdrowia

Spis treści

- 
1. Instalacja aplikacji mobilnej
 2. Logowanie
 3. Przypominanie hasła
 4. Ekran startowy
 5. Program SmartDoctor
 6. Parowanie i ustawienia urządzenia Higo
 7. Badanie urządzeniem Higo
 8. Historia pomiarów
 9. Ankieta pacjenta

Aplikacja mobilna

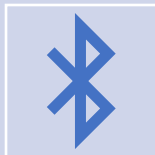

Aby móc korzystać z programu „SmartDoctor” musisz mieć zainstalowaną aplikację mobilną DOM. Do jej działania wymagany jest stały dostęp do Bluetooth i WiFi w Twoim telefonie.



Aplikację Domowej Opieki Medycznej można odnaleźć w sklepie dla użytkowników telefonów z systemem Android, czyli sklepie Google Play, a dla użytkowników systemu iOS w Apple Store.




Po uruchomieniu programu przez Lekarza POZ lub AOS ikona programu będzie widoczna w aplikacji pacjenta. Przed pierwszym użyciem i badaniem, trzeba sparować aplikację z urządzeniem.

Instalacja aplikacji mobilnej





Pobierz bezpłatną aplikację Domowa Opieka Medyczna ze sklepu App Store lub Google Play.

1. Znajdź ikonę sklepu w telefonie i kliknij.
2. W górnej części ekranu w polu wyszukiwania wpisz "Domowa opieka medyczna".
3. Kliknij: Zainstaluj / Pobierz.
4. Włącz w telefonie funkcję Bluetooth oraz WiFi, aby móc połączyć aplikację z urządzeniem Higo.

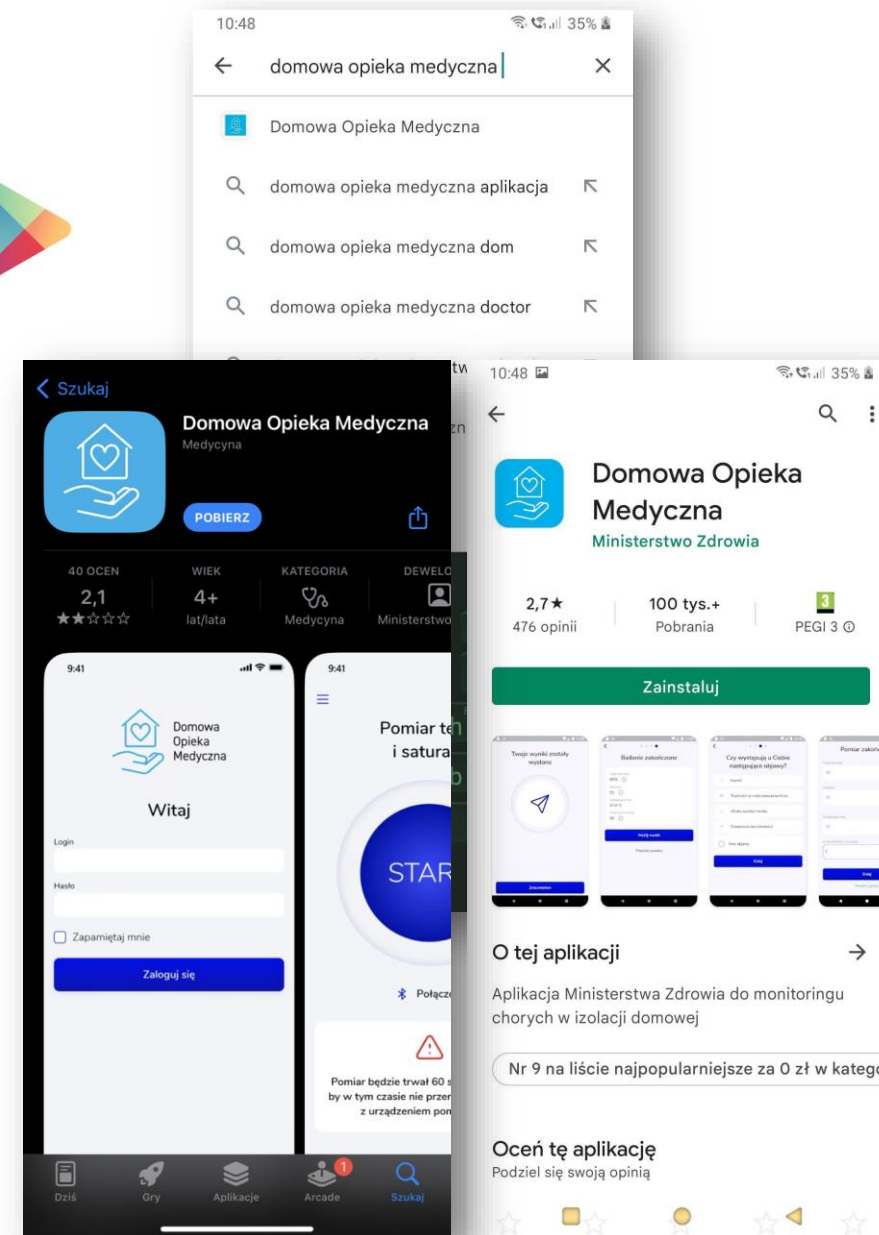


Włączanie Bluetooth

Aby połączyć aplikację z urządzeniem Higo włącz w telefonie Bluetooth oraz WiFi, a w ustawieniach zezwól na dostęp do Bluetooth.

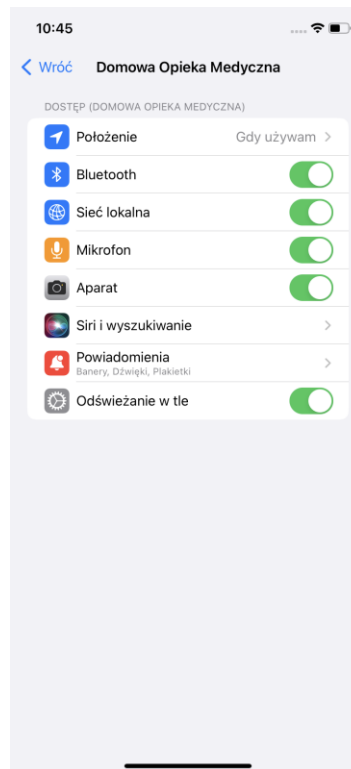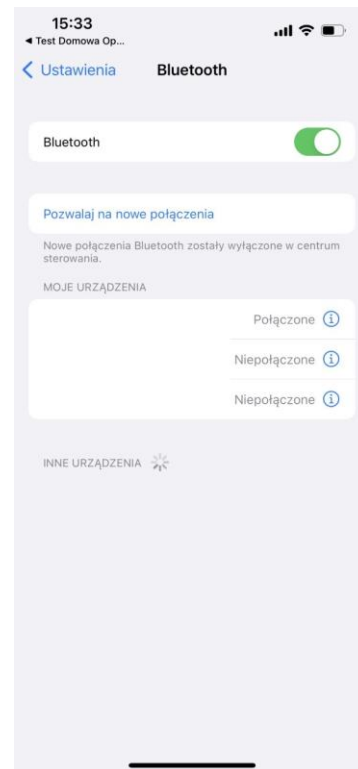


Logowanie

- W celu zalogowania się do systemu, przejdź na stronę <https://dom.mz.gov.pl> lub otwórz aplikację mobilną.
- Wybierz użytkownika Pacjent.

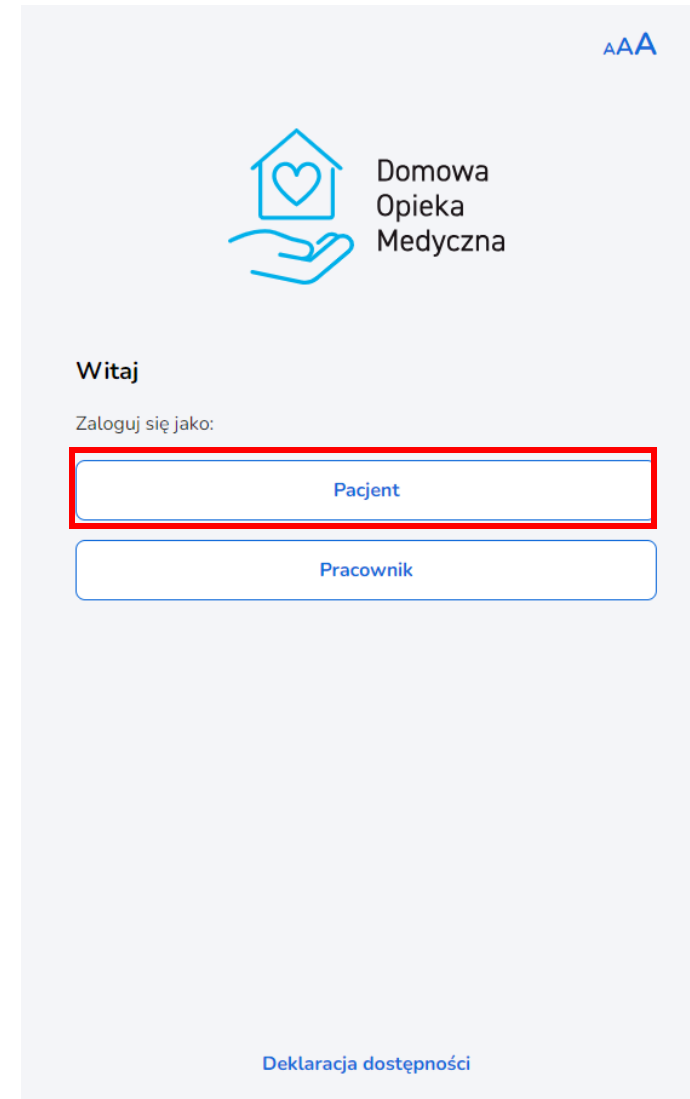

Logowanie

- Na tej stronie wprowadź numer telefonu oraz kod weryfikacyjny, otrzymany SMS-em, lub hasło, jeżeli zostało już wcześniej przez Ciebie ustawione.
- Jeżeli nie pamiętasz lub nie znasz swoich danych logowania, możesz skorzystać z logowania za pomocą login.gov.pl.

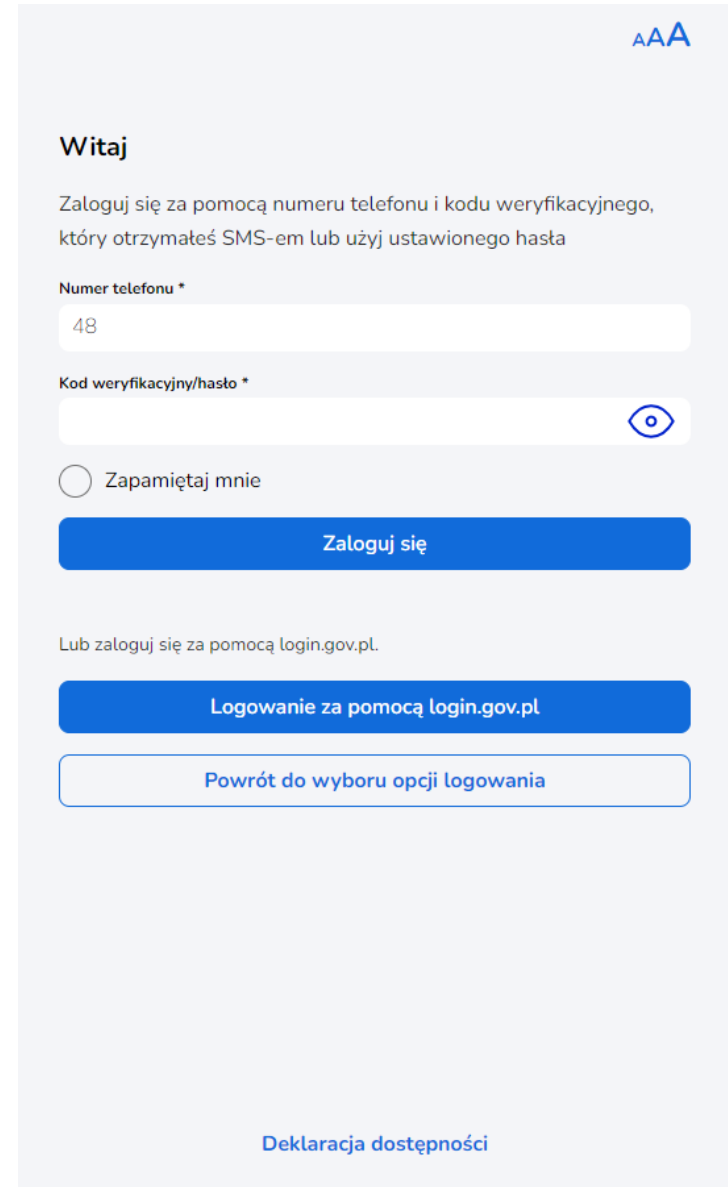

AAA

Witaj

Zaloguj się za pomocą numeru telefonu i kodu weryfikacyjnego, który otrzymałeś SMS-em lub użyj ustawionego hasła

Numer telefonu *

48

Kod weryfikacyjny/hasło *

☐ Zapamiętaj mnie

[Zaloguj się](#)

Lub zaloguj się za pomocą login.gov.pl.

[Logowanie za pomocą login.gov.pl](#)

[Powrót do wyboru opcji logowania](#)

[Deklaracja dostępności](#)

Logowanie

- Jeżeli zostanie wybrana opcja logowania za pomocą login.gov.pl to możesz zalogować się do systemu poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub mojeID.

Login 

Use eID of your country  Choose country 

Wybierz sposób logowania

Bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych

Profil Zaufany
Bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe online i podpiszesz dokumenty elektronicznie.

e-dowód
Dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Użyj aplikacji mobilnej albo czytnika podłączonego do komputera.




CRÉDIT AGRICOLE


Bank Pekao


mBank


Bank Polski


Bank Pekao


TEST
Bank Pekao


inteligo


BOŚ
BANK

Przypominanie hasła

- Jeśli usuniesz SMS z hasłem do systemu lub będzie wymagany reset hasła, w pierwszej kolejności skontaktuj się z lekarzem POZ/AOS.
- Lekarz w szczegółach Twojego profilu, w zakładce Dane podstawowe, ma możliwość wybrania przycisku **Wyślij kod ponownie**.
- Po wybraniu tego przycisku, na Twój telefon zostanie przesłane hasło.

The screenshot displays a medical application interface. At the top, there is a red alert banner labeled "Alert medyczny". Below this, the status is "Nieprzejrzany" and the risk category is "Niska (Aut.)". The interface is divided into two main sections. The left section, titled "Dane podstawowe", contains a form with fields for PESEL, Date of COVID-19 diagnosis (22.04.2022), phone number, address, and other patient information. A button labeled "Wyślij kod ponownie" is highlighted with a black box. The right section, titled "Pomiar", shows vital signs: Saturation (90% with a red triangle), Heart rate (47), Body temperature (36 °C), and Respiratory rate (14). Below the vital signs are four buttons: "Zadzwoń", "Video rozmowa", "Wiadomość", and "Zaplanuj teleporadę".

Alert medyczny

Pomiar 20.04.2022 17:32

Status: ☒ Nieprzejrzany Kategoria ryzyka: Niska (Aut.)

Pomiary Dane medyczne **Dane podstawowe** Uwagi Historia Ustawienia

PESEL Data rozpoznania COVID-19
22.04.2022

Numer telefonu Adres pobytu Czy pacjent przebywa samotnie?

Imię i nazwisko osoby kontaktowej Numer telefonu osoby kontaktowej Godzina rozpoczęcia dziennej aktywności
48123123123 07:00

Godzina zakończenia dziennej aktywności
18:06

Numer oddziału NFZ Kod świadczeniodawcy Numer umowy

Kod SMS
[Wyślij kod ponownie](#)

Saturacja Objawy
90% Brak

Tętno
47

Temperatura ciała
36 °C

Oddechy na minutę
14

Zadzwoń Video rozmowa Wiadomość Zaplanuj teleporadę

Ekran startowy

Po zalogowaniu zostaniesz skierowany na ekran startowy z opisem dostępnych w aplikacji programów. Aby dany program był u Ciebie dostępny, musi zostać uruchomiony przez lekarza POZ lub AOS.





Program SmartDoctor

W czasie uruchomienia programu SmartDoctor, w menu Twojej aplikacji mobilnej, w zakładce **Pomiary** zostaną dodane dwie pozycje:

- **SmartDoctor** – tutaj możesz przejść do widoku rozpoczynania badania,
- **Ustawienia urządzenia Higo** – w tym miejscu możesz dodać (zmienić) sieć WiFi przypisaną do urządzenia.

W zakładce **Historia pomiarów** możesz zobaczyć historię swoich pomiarów.

Uwaga: Badania możesz rozpoczynać jedynie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

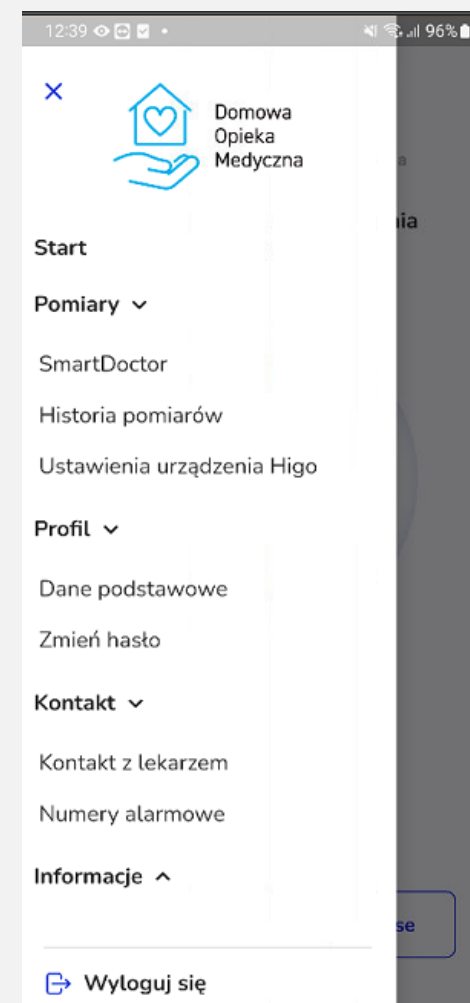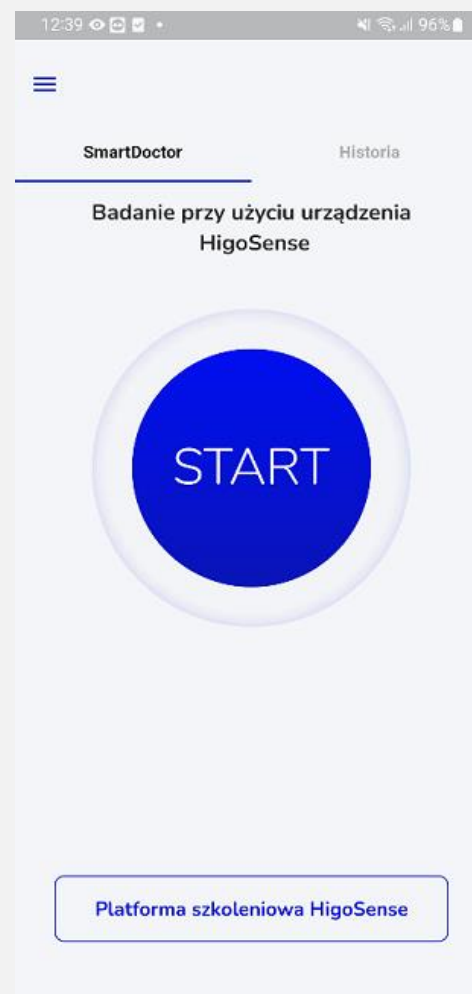


Parowanie urządzenia

Uwaga: Urządzenie musi być włączone w czasie parowania.



Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji mobilnej, musisz sparować urządzenie, aby móc wykonywać badania. Możesz to zrobić, wykonując następujące akcje:

1. W menu wybierz pozycję **Ustawienia urządzenia Higo**.
2. Wybierz przycisk **Paruj**.
3. Czekaj na połączenie aplikacji z urządzeniem.
4. Wprowadź nazwę sieci WiFi oraz hasła (badania będą przesyłane za pośrednictwem sieci WiFi).
5. Czekaj na połączenie urządzenia z siecią WiFi.

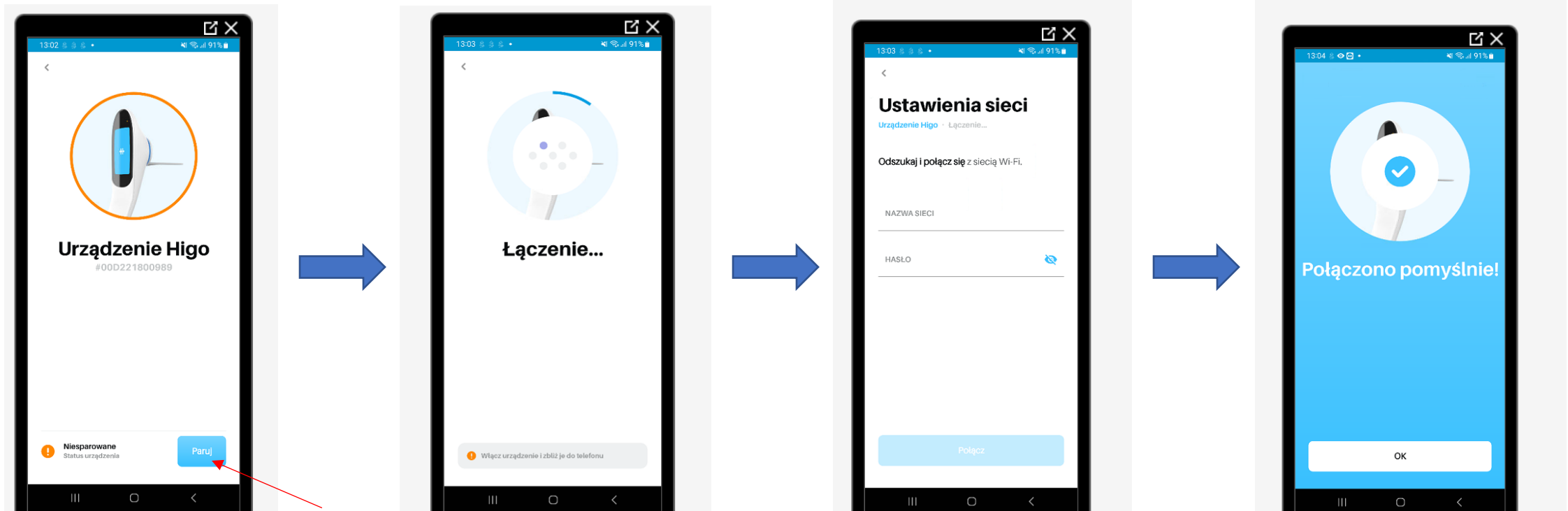


Ustawienia urządzenia Higo

- Jeżeli urządzenie zostało już przez Ciebie sparowane, to w zakładce **Ustawienia urządzenia Higo** możesz:
 - Sparować urządzenie ponownie,
 - Dodać nową sieć WiFi.

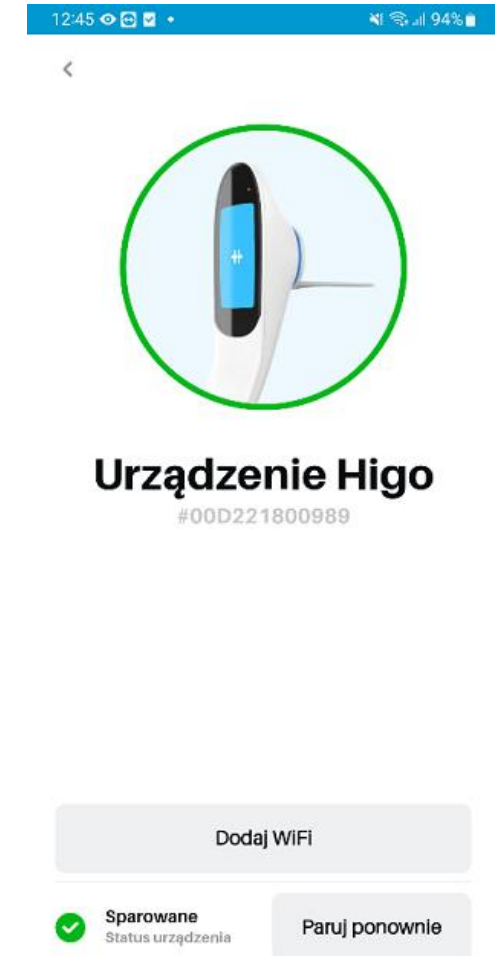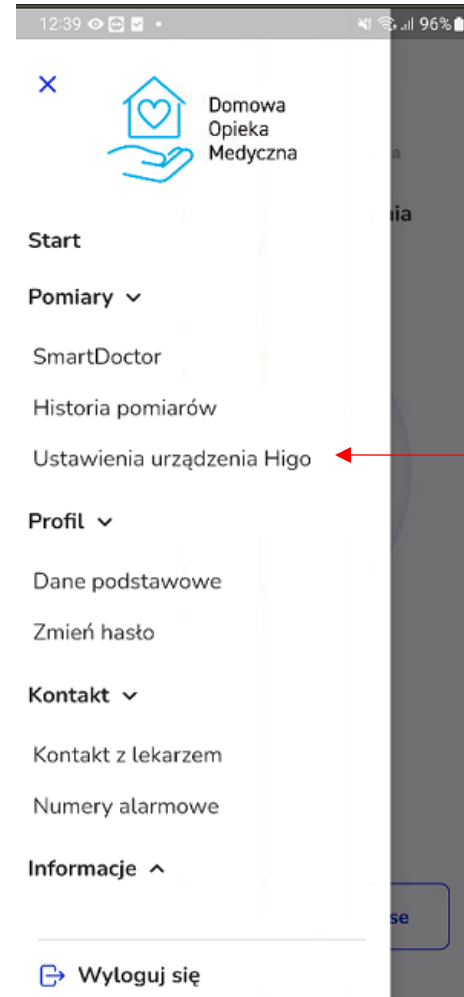


Rozpoczynanie badania

- Aby rozpocząć badanie, wybierz przycisk **START** dostępny na ekranie programu SmartDoctor.
- Zostaną wtedy wyświetlone po kolei kroki, które należy wykonywać w aplikacji oraz za pomocą urządzenia, aby przeprowadzić badanie.
- W pierwszym etapie należy wypełnić lub zaktualizować wywiad ogólny. Następnie, w przypadku badania pełnego, należy wypełnić wywiad chorobowy, aby aplikacja podpowiedziała jakie badania należy wykonać. W trzecim etapie należy wykonać badania.
- Możesz wykonać badania:
 - Pełne - poprzedzone wywiadem, jest to badanie, które należy wykonywać w ramach programu pilotażowego,
 - Pojedyncze – wybrane przez Ciebie pojedyncze badanie, np. pomiar temperatury. Można je wykonywać bezpośrednio z poziomu urządzenia,. Tak wykonane badanie zostanie zapisane w systemie.

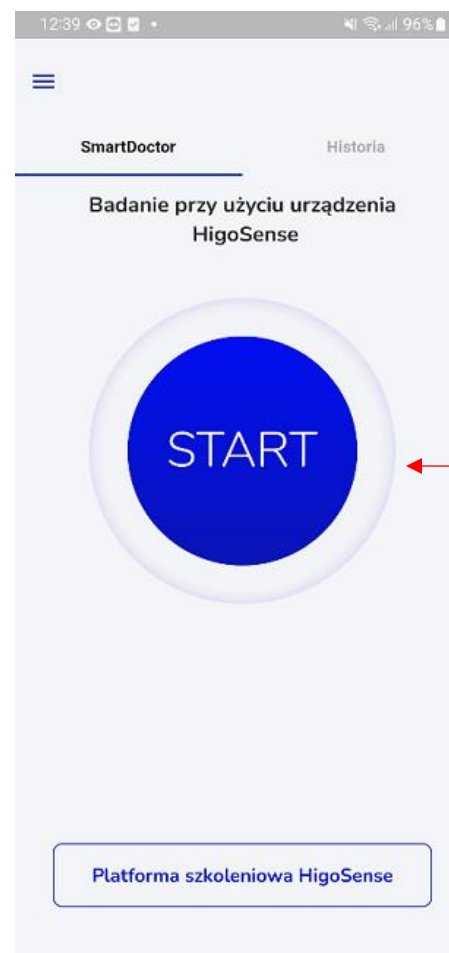

Platforma szkoleniowa

- Na widoku programu SmartDoctor dostępny jest przycisk **Platforma szkoleniowa HigoSense**.
- Prowadzi on do szkolenia dotyczącego posługiwania się urządzeniem.
- Po wybraniu przycisku, zostaniesz przekierowany na stronę z platformą szkoleniową. Aby otrzymać dostęp do szkolenia, w pierwszym kroku będziesz musiał się zarejestrować.


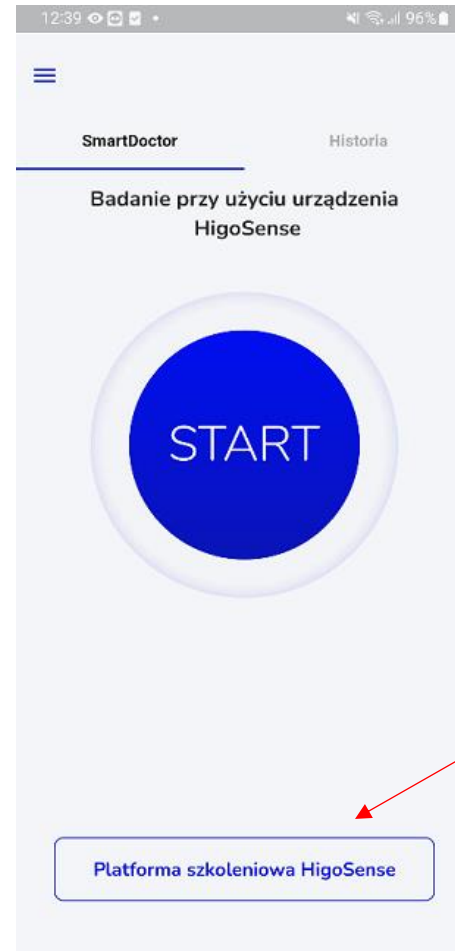


Historia pomiarów

Masz możliwość wglądu w badania wykonane w ramach danego programu zarówno poprzez aplikację mobilną, jak i na stronie <https://dom.mz.gov.pl/login>.

W aplikacji mobilnej należy przejść do zakładki **Historia** w panelu programów. Po wybraniu danego programu, na liście otwarty zostanie widok szczegółów z badania. Po wykonaniu oceny badania przez lekarza, przygotowany przez niego opis będzie widoczny w tej zakładce.

Ze względu na format, raport z badania dostępny jest jedynie na stronie internetowej.

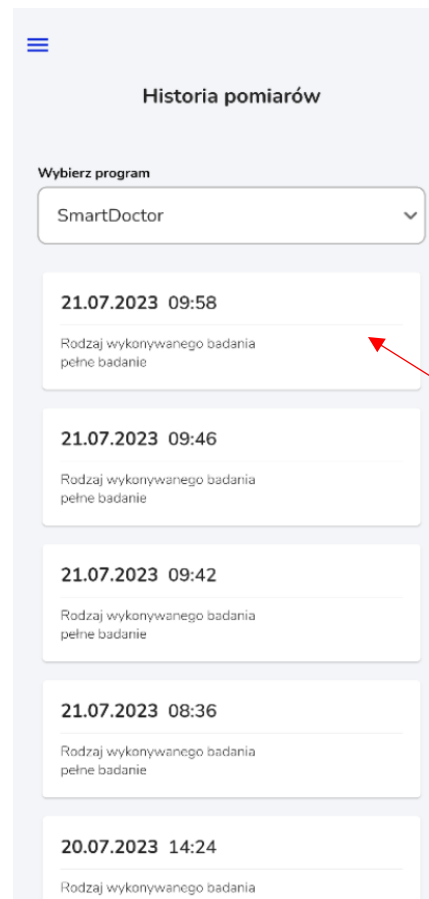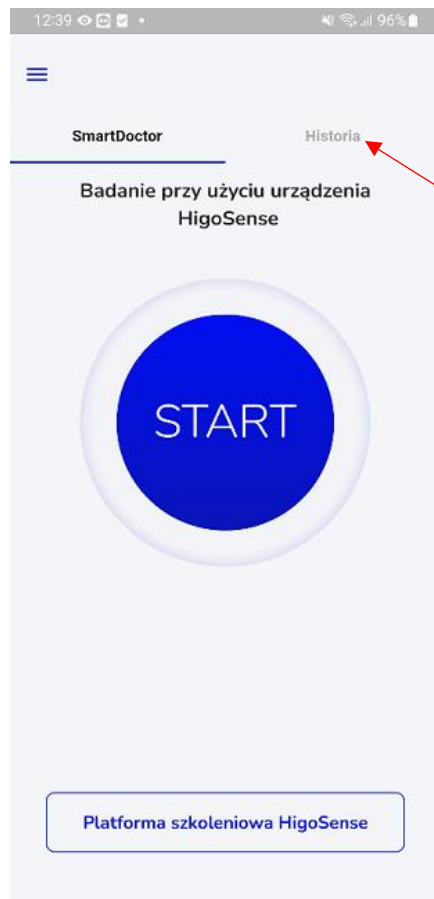

Historia pomiarów

Na stronie internetowej, w zakładce **Historia pomiarów**, w polu **Wybierz program** wybierz pozycję SmartDoctor. W tabeli zostaną wtedy wyświetlone wyniki pomiarów dla danego programu.

Po wybraniu badania z listy, otwarty zostanie panel ze szczegółami tego badania. Widoczna jest tam **Ocena badania**, czyli opis badania wykonany przez lekarza oraz przycisk **Otwórz szczegóły z badania**. Pozwala on na otwarcie raportu z pomiaru.

Domowa Opieka Medyczna

Login: Pacjent AAA Wyloguj się

Historia pomiarów

Pierwszy pomiar

Wybierz program: SmartDoctor

Pomiary

Data i godzina pomiaru	Czy badanie zostało ocenione	Rodzaj wykonanego badania
21.07.2023 09:58	nie	pełne badanie
21.07.2023 09:46	nie	pełne badanie
21.07.2023 09:42	nie	pełne badanie
21.07.2023 08:36	nie	pełne badanie
20.07.2023 14:24	nie	pełne badanie
17.07.2023 13:57	nie	pełne badanie

Pomiar 21.07.2023 09:58




Rodzaj wykonanego badania
pełne badanie: pomiar temperatury, obrazowe badanie zmian skórnych

Ocena badania
-

Otwórz szczegóły z badania

Ankieta pacjenta

- Po zakończeniu programu przez Lekarza, otrzymasz SMSa z informacją o jego zakończeniu.
- Wówczas w Twojej aplikacji pojawi się obowiązkowa ankieta. Dodatkowo w menu bocznym dostępny będzie przycisk, umożliwiający przejście do wypełnienia ankiety. Wyświetlone zostanie także okienko z przypomnieniem o konieczności jej wypełnienia.
- Wypełnienie ankiet jest dla Ciebie obowiązkowe.

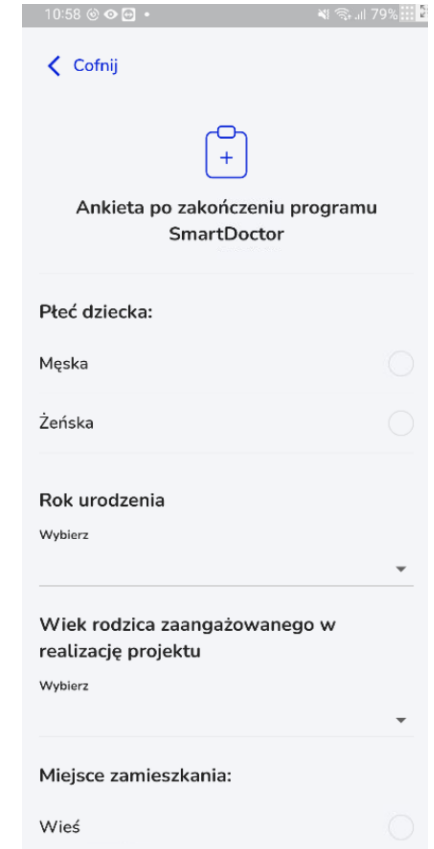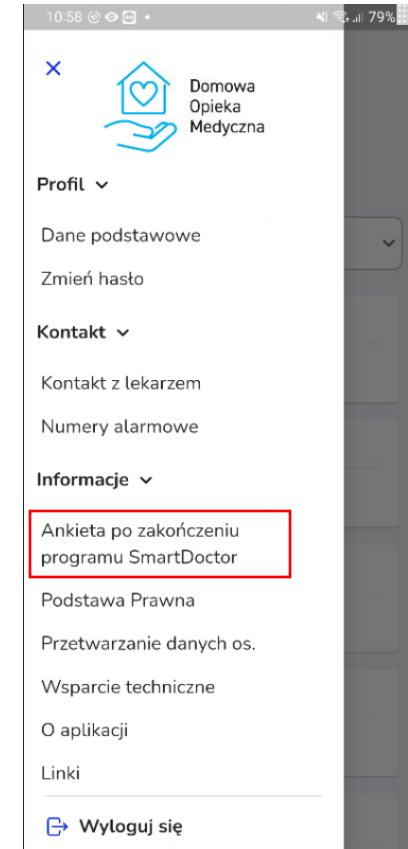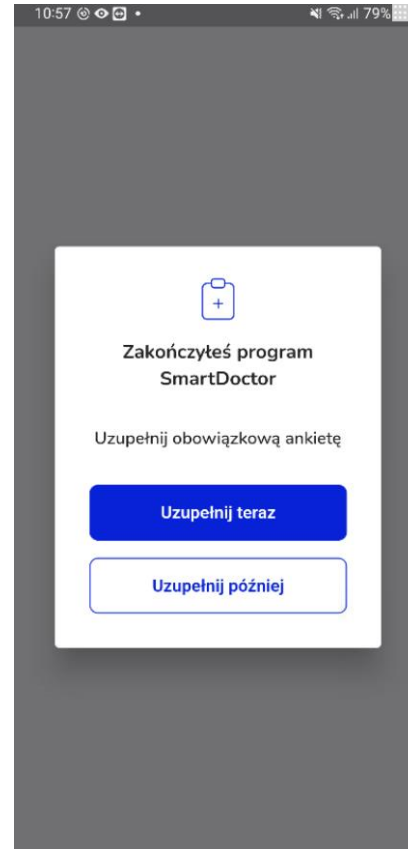



Program zakończony

- Po uzupełnieniu ankiety program zostaje uznany za zakończony.

Dziękujemy



Domowa
Opieka
Medyczna



Ministerstwo Zdrowia